
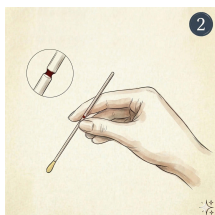


# PROBiome VAGINAL – Analisi Microbiota Vaginale






## ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE BIOLOGICO

### Preparazione:

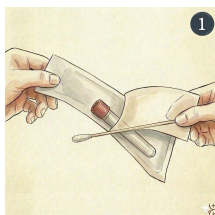

- Lavarsi le mani;
- Indossare il guanto sterile in dotazione;
- Aprire la busta contenente il tampone per il prelievo e la provetta con il liquido di conservazione (immagine 1). **Non versare il liquido contenuto nella provetta;**
- Evitare che la punta della bacchetta cotonata entri in contatto con aree del corpo o superfici diverse dal sito di campionamento;
- Tenete la bacchetta in corrispondenza del punto di rottura indicato dal segno rosso sull'asta (immagine 2);
- Rimuovere l'eccesso di muco - se presente - dal canale cervicale con un semplice cotton fioc.

### Raccolta del Campione:

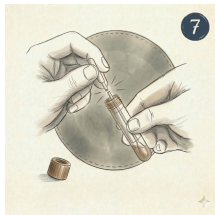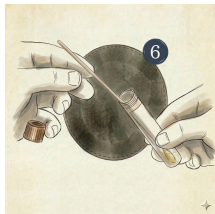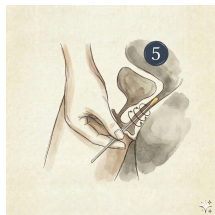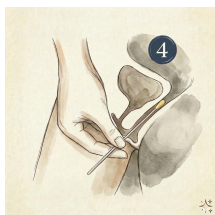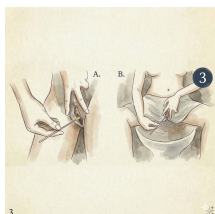

- Assumere una delle posizioni raffigurate nell'immagine 3:
  1. In piedi con le gambe aperte;
  2. Seduta sulla toilette con le gambe aperte.
- Con la mano libera, tirare indietro le pieghe cutanee che coprono l'apertura della vagina.
- Inserire il tampone nell'apertura vaginale finché le dita toccheranno la vulva (immagine 4).
- Ruotare il tampone una decina di volte in senso orario e antiorario (immagine 5). Durante tale procedura non esercitare eccessiva pressione sul tampone per evitare che si spezzi l'asta.
- Inserire il tampone nella provetta finché il punto di rottura (segno rosso) non si trova al livello dell'apertura della provetta (immagine 6). Ruotare delicatamente il tampone per permettere il rilascio di parte del materiale biologico nel liquido di conservazione.
- Piegare e spezzare il tampone (immagine 7) in corrispondenza del punto di rottura dirigendo la provetta lontano dal viso.
- Chiudere la provetta con il tappo azzurro a vite (immagine 8) lasciando all'interno la bacchetta cotonata.

### Identificazione, Conservazione e Spedizione:

- Applicare il Codice a barre longitudinalmente sulla provetta in modo che risulti **TUTTO** leggibile. Riporre la provetta prima nella bustina scura di sicurezza e poi nella scatola del kit, mettere quest'ultima nella scatola bianca con la quale ti è stato spedito.
- Richiedere il ritiro attraverso l'**APP** di **GeneS** per smartphone.
- Conservare il campione a **Temperatura Ambiente** fino al passaggio del nostro corriere.